

عنوان دستورالعمل:

کنترل کیفی بلادگز

کد خط مشی: WIM 13-24	شماره ویرایش: ۱۱	تاریخ تصویب و ابلاغ: ۱۴۰۵/۲/۲۰
حوزه تولید: آزمایشگاه	تعداد صفحه ها: ۲	تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۵/۲/۱۷
هدایت کننده: مسئول فنی آزمایشگاه		تاریخ بازبینی بعدی: ۱۴۰۶/۲/۲۰

اهداف:

هدف از کنترل کیفی در بخش گازهای خون اطمینان از دقت و صحت عملکرد دستگاههای موجود در بخش گازهای خون می باشد.

شیوه انجام کار:

تمامی کار های کنترل کیفی توسط مسئول بخش یا پرسنل آموزش دیده صورت میگیرد.

۱. کنترل کیفی دستگاههای (Techno medical) و XD

۱.۱. برای انجام کنترل کیفی این دستگاهها از آمپول تهیه شده توسط شرکت سازنده و در یخچال نگه داری می شود. استفاده می شود.

۱.۲. روزانه قبل از شروع کار، یکی از آنها شکسته می شود و بلافاصله مانند یک نمونه به دستگاهها تزریق می شود.

۱.۳. جواب قرائت شده باید در محدوده تعریف شده در بروشور داخل کیت کنترل باشد.

۲. کنترل کیفی دستگاههای Diagnostic :

۲.۱. برای انجام کنترل کیفی این دستگاهها از آمپول تهیه شده توسط شرکت سازنده استفاده می شود .

۲.۲. روزانه قبل از شروع کار مانند نمونه رقیق می شوند و به دستگاه داده جواب می شود.

۲.۳. جواب قرائت شده باید در محدوده تعریف شده در بروشور کیت کنترل باشد.

نام و سمت تهیه کنندگان:

- دکتر کامبیز مظفری: مسئول فنی بخش بلادگز
- حسین عباسی: مسئول بخش
- تقی جهانبخش: همکار و جانشین مسئول بخش

امکانات و ملزومات لازم:

نیروی انسانی

مواد آزمایشگاهی

وتمام دستگاهها

مراجع:

کتابها و کاتالوگهای مربوط به دستگاههای تکنومدیکا، Diagnostic, بیوشیمی دیوید سون، تجربیات درون بخش

نام و امضاء تایید کننده معاون درمان: دکتر لیلا عبدالکریمی	نام و امضاء سرپرست تهیه کنندگان مسئول فنی بخش بلادگز: دکتر کامبیز مظفری
نام و امضاء تصویب و ابلاغ کننده رئیس انستیتو: دکتر فریدون نوحی	مهر و امضاء دفتر بهبود کیفیت دکتر بهزاد مومنی